

Axcess 60cm sans poignée

Codes :

Reference: 091169739

**Description :**

Long. : 61cm

Larg. int : 73,7cm

Larg. Totale : 76,5cm

Dim. (L x l x h) : 61cm x 38cm x 7,6cm (pliée)

poids : 5kg

poids maximum : 272kg

Pas de poignée de transport sur cette référence

Pour scooters et fauteuils roulants

Rampe deux parties

Surface antidérapante

Assemblage des deux parties par charnières

Pliable

Poignée de transport sur chacune des deux parties (sauf sur la version 61cm)

En aluminium

Lors du choix d'une rampe, la longueur et donc l'angle d'inclinaison de la rampe dépendent :

- de la hauteur du palier,
- du type de fauteuil roulant ou de scooter,
- du poids du fauteuil roulant ou du scooter avec l'utilisateur,
- de la force de l'accompagnateur ou de l'utilisateur.

En règle générale, un dénivelé de 1 sur 12 est recommandé pour les utilisateurs en fauteuil roulant

ou scooter. Pour faire monter un fauteuil roulant ou un scooter à vide dans un véhicule, une pente plus importante peut être utilisée mais elle ne doit pas être supérieure à 1 sur 3. En outre, il est important de consulter le guide d'utilisation du véhicule pour connaître le bon degré d'inclinaison et d'orientation avant d'utiliser la rampe. Ne jamais dépasser les valeurs recommandées.