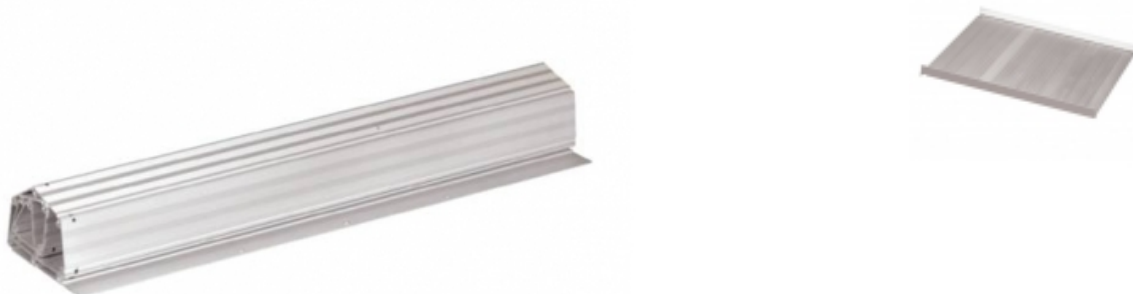


# Rampe enroulable Axxess 150cm

**Codes :**

Reference: 091170901

**Description :**

Matériau : Aluminium  
Long. : 1m52  
Larg. Totale : 76,5cm  
poids : 12,8kg  
poids maximum : 273kg

Légère  
Compacte et facilement transportable  
Se roule pour faciliter le transport  
S'installe en quelques secondes  
Surface antidérapante  
Rebords latéraux

Lors du choix d'une rampe, la longueur et donc l'angle d'inclinaison de la rampe dépendent :  
de la hauteur du palier,  
du type de fauteuil roulant ou de scooter,  
du poids du fauteuil roulant ou du scooter avec l'utilisateur,  
de la force de l'accompagnateur ou de l'utilisateur.

En règle générale, un dénivelé de 1 sur 12 est recommandé pour les utilisateurs en fauteuil roulant ou scooter. Pour faire monter un fauteuil roulant ou un scooter à vide dans un véhicule, une pente plus importante peut être utilisée mais elle ne doit pas être supérieure à 1 sur 3. En outre, il est important de consulter le guide d'utilisation du véhicule pour connaître le bon degré d'inclinaison et d'orientation avant d'utiliser la rampe. Ne jamais dépasser les valeurs recommandées.

