

Spéculum auriculaire noir diam. 2,5 mm x250 pièces

Codes :

Reference: 2470025ACN

**Description :**

Pour otoscopes. Usage unique. Boîte de 250 pièces.

Dispositif à usage unique non stérile.

Dispositif raccordé : Oui Raccordement à un otoscope de marque ou de type Heine, Kawe, Gima, Holtex, Riester, Welsh Allyn et de fabrication pakistanaise.

Dispositif Usage Unique : Oui. Mono patient pendant l'utilisation puis jetable, ne pas réutiliser.

Dispositif stérile : Non

Stérilisation : Oui. A l'oxyde d'éthylène et chimique. Pas d'air chaud ou gamma , stériliser avant utilisation, dispositif à Usage Unique ne peut être stérilisé après utilisation.

Autoclavable : Non

Nettoyage : Oui .Avec une solution n'attaquant pas le PS, au détergent ou l'eau savonneuse. Ne pas nettoyer après utilisation, dispositif à Usage Unique.

Substance impropre : Produit attaquant le PS comme l'Acétone, Benzène, Chloroforme.

Pièces constitutives : Non.

Matières : Polystyrène (PS,HIPS) ½ choc DowPS 485 71 naturel B G 1444. Colorant BASF Liqui Kolor VL2786 à1.5%.

Contient du latex : Non.

Recyclage :Oui. matière recyclable.

UTILISATION

Dispositif permettant l'observation de l'intérieur de l'oreille avec un otoscope.

MODE D'EMPLOI

Prendre un spéculum et le fixer sur un otoscope, pour les modèles 24 701 XX le clipper sur l'otoscope, pour les modèles 24 7X0 XX fixation à baïonnette. Après utilisation le jeter dans un récipient prévu pour les déchets médicaux. Dispositif à usage unique non stérile.

PRÉCAUTION D'EMPLOI et/ou AVERTISSEMENT USAGE UNIQUE

Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente et qualifiée. À utiliser en usage unique par personne, il est recommandé d'utiliser un spéculum par oreille par patient pour éviter les contaminations oreille/oreille sur la même personne.

Ne jamais introduire le spéculum jusqu'au fond de l'oreille, respecter une distance adéquate avec le fond de l'oreille, risque de perforation. Bien maintenir la tête du patient pour éviter tout geste inadéquat. Dispositif à usage unique, ne doit pas être réemployé, risque de contamination croisée avec un autre patient.

Spéculum auriculaire noir diam. 2,5 mm