

Montre infirmière rouge

Codes :

Reference: 2430049LVM

**Description :**

En silicone avec épingle de fixation. Livrée dans une boîte métal.

Montre infirmière

Comed

En silicone avec épingle de fixation. Livrée dans une boîte métal.

Existe en bleue, jaune, blanche, noire, verte, rouge, orange, rose, fuchsia, zèbre, fleurs, léopard, gouttes d'eau. Garantie : 1 an.

S'attache avec une épingle de sécurité.

Pour le respect des procédures de lavage des mains.

Garantie 1 an hors pile.

Montre infirmière portative étanche avec système d'accroche par épingle de sûreté.

La montre infirmière n'est pas un dispositif médical au sens de la Directive 93/42/CE.

Nettoyage : Enlever la montre de son support en silicone et nettoyer la partie en silicone avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou d'alcool à 70°. Pour le corps de la montre, passer un chiffon humide. La montre est étanche.

Mode d'emploi Pour mettre en fonction la montre, la dégager de son corps en silicone puis enlever la languette protectrice située sur le remontoir. Tirer sur le remontoir et le tourner pour régler l'heure avant de le l'enfoncer pour enclencher le mécanisme. Remettre le cadran dans le corps en silicone du côté opposé à l'épingle de fixation. Changement de la pile : A l'arrière de la montre, ouvrir le boîtier à l'aide de l'encoche prévue à cet effet.

Soulever la partie arrière à l'aide d'un outil fin et pointu. Enlever la protection blanche en plastique et

retirer la pile en la faisant glisser sur le côté. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité, le + vers le haut. Remettre la protection blanche et refermer le boîtier.